

Gebrauchsanweisung – Mode d'emploi – Modo d'uso

Armtraggurte/ bretelles pour bras/ mitelle: 84006 – 84018

Vers. 3 / 22.01.2024

1.



DE: Den verletzten Arm in die verstellbare Schlinge legen und den Gurt mittels Metalllasche auf die gewünschte Höhe einstellen.

FR: Placer le bras blessé dans la boucle variable et fixer la bretelle avec la lame métallique sur la hauteur souhaitée

IT: Mettere il braccio ferito nell' tirante regolabile e posizionare la mitella con ajuta dell' biscottino metallico all' altezza desiderata.

2.



DE: Den Gurt quer hinter den Rücken führen und nach vorne ziehen. Den Unterarm in die zweite fixe Schlinge legen.

FR: Laisser faire passer la ceinture en travers du dos et la faire revenir par devant. Placer l'avant-bras dans la 2^{ème} boucle fixe.

IT: Guidare la cintura dietro la schiena e tirare in avanti. Mettere l'avambraccio nel secondo cappio fisso.

3.



DE: Die Schlinge so anlegen, dass sie am Hals nicht einschneidet.

FR: Positionner la bretelle afin qu'elle ne coupe pas le cou.

IT: Indossare la mitella in modo da non tagliare il collo.

4.



DE: Die Schlinge kann je nach Bedarf höher oder tiefer fixiert werden. Regulierbar mittels der Metalllasche.

FR: La bretelle peut être fixée plus haut ou plus bas selon les besoins. Réglable au moyen du la boucle métallique.

IT: Il cappio può essere fissato più o meno in alto o in basso in base alle esigenze. Regolabile per mezzo dell' biscottino metallico.

- Handwäsche bis 30°C, an der Luft trocknen, nicht im Tumbler
- Laver à la main jusqu'à 30 °C, laisser sécher à l'aire libre, ne pas mettre dans le sécheur
- Lavare a mano fino a 30°C, asciugare all'aria, non asciugare in asciugatrice