


Gebrauchsanweisung – Mode d'emploi – Modo d'uso

Armtrageschlinge / bretelle pour bras/ mitella FOAM

Vers. 3/ 07.02.2024/CKP

1.

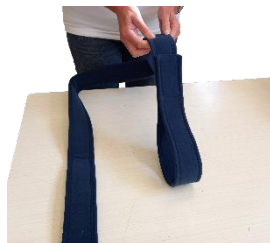

DE: Die Armtrageschlinge auf einer Unterlage ausbreiten und ein Ende der Schlinge mittels Klettverschluss zu einer Schlaufe für den verletzten Arm formen.

FR: Étendre la bretelle de bras sur un support et former une boucle avec la bande velcro à l'une des extrémités de la bretelle pour le bras blessé.

IT: Stendere la mitella su una superficie e formare un'estremità della mitella in un occhiello per il braccio ferito usando il velcro.

2.



DE: Die Schlinge hinter den Rücken führen und nach vorne ziehen. Den Unterarm in die Schlaufe legen.

FR: Passer la bretelle derrière le dos et la tirer vers l'avant. Placer l'avant-bras dans la boucle.

IT: Guidare la mitella dietro la schiena e tirarlo in avanti. Inserire l'avambraccio nell'occhiello.

3.



DE: Das zweite Ende je nach Bedarf höher oder tiefer stellen und mittels Klettverschluss fixieren.

FR: Placer la deuxième extrémité plus haut ou plus bas selon les besoins et la fixer à l'aide du velcro.

IT: Alzare o abbassare la seconda estremità secondo le necessità e fissarla con il velcro.

4.



DE: Sicherstellen, dass der Arm gut fixiert ist und dass die Schlinge nicht verdreht ist.

FR: S'assurer que le bras est bien fixé et que la bretelle n'est pas tordue.

IT: Assicurarsi che il braccio sia ben fissato e che la mitella non sia attorcigliata.

Zusammensetzung / Composition / Composizione: 100% Polyester/ Poliestere

- Handwäsche bis 30 °C, Klettverschlüsse vor dem Waschen schliessen. An der Luft, nicht im Tumbler trocknen
- Laver à la main jusqu'à 30 °C, fermer les bandes velcro avant le lavage. Laisser sécher à l'aire libre, ne pas mettre dans le sécheur
- Lavare a mano fino a 30 °C, chiudere le chiusure in velcro prima del lavaggio. Asciugare all'aria, non asciugare in asciugatrice

