



DE: Gebrauchsanweisung für Verbrennungswesten

FR: Mode d'emploi pour les gilets brûlures

IT : Istruzioni per l'uso gilè per ustioni

Ref: 80003, 120 x 100 cm, Medium Ref: 80005, 140 x 115 cm, Large

DE: 100 % Baumwolle aus gestrickter Gaze **FR:** Gilet en gaze à maille, 100 % coton **IT:** Gilè in garza a maglia, cotone 100%

1. **DE:** Weste auspacken und öffnen. Der Patient wird auf dem Rücken in die Mitte der Weste gelegt.
FR: Déballez et ouvrez le gilet. Le patient est placé sur le dos au centre du gilet.
IT: Disimballare e aprire il gilè. Il paziente è posto sulla schiena al centro del gilè.



2. **DE:** Beide Seiten werden wie ein Hemd nach vorne geschlossen:
FR: Les deux côtés sont fermés à l'avant comme une chemise :
IT: Entrambi i lati sono chiusi verso il davanti come una camicia:

nachher:
après :
dopo :




3. **DE:** Anschliessend die Schlaufen über Kreuz zubinden.
FR: Ensuite nouez les lacets en croix.
IT: In seguito a ciò, legare i cappi in modo incrociato.



4. **DE:** Fertig angezogen **FR:** Prêt habillé **IT:** Pronto vestito



DE: Hersteller
FR: Fabriquant
IT: Produttore

 **MEDICALE GAZE SA**
 17, 22 Rue de cuir Z .I Sidi Rézigue
 2033 MEGRINE TUNISIE

DE: Importeur & CH-REP
FR: Importateur & CH-REP
IT: Importatore & CH-REP



Forni Medical GmbH
 Heldswilerstrasse 13
 CH-9214 Kradolf