



**EMODIAL®**

**EXIT-POCKET® WP**



**EMODIAL®**

Via Finati, 4-4/A - Ferrara - ITALY

Tel. +39 0532 978198 - Fax +39 0532 978414

[www.emodial.com](http://www.emodial.com) - [info@emodial.com](mailto:info@emodial.com)

Importer & CH-REP:



Heldswilerstrasse 13 | CH-9214 Kradolf

Tel. +41 (0)71642 35 68 | [info@fornimedical.ch](mailto:info@fornimedical.ch)

[www.fornimedical.ch](http://www.fornimedical.ch)

Ref. IT0013-FM Rev. 01/2022

**Pochette étanche de  
protection des cathéters**

# EXIT-POCKET® WP

## Pochette étanche de protection des cathéters

### DESCRIPTION

**EXIT-POCKET WP** est une pochette étanche fermée sur quatre côtés avec un trou adhésif pour la fixation sur la peau.

### INDICATIONS

Confinement des extrémités du cathéter pendant l'hygiène du patient (bain et douche) et les activités aquatiques (plongée en mer ou en piscine).

### INTÉRÊT DU DISPOSITIF

Conçu pour protéger le site de sortie du contact de l'eau. Le dispositif est complètement étanche: si correctement positionné, il protège le site de sorti du contact de l'eau, prévenant la possibilité d'une contamination microbienne.

### AVANTAGES

- Positionnement rapide et facile.
- Port confortable.
- Aide à améliorer la qualité de vie des patients sous cathéter.
- Retrait facile et rapide.



### RÉFÉRENCES

CODE	MÉSURES (cm)			INDICATION	PCS. / BOÎTE
	Ouverture	L	A		
S2005H/WP	ø 5	11	22	Bain et douche	50
S2011H/WP	10 x 9	13	26	Bain et douche	50
S2013HL/WP	13 x 11	17,6	30	Bain et douche	50
S2013H/WP	11 x 13	15,6	30	Bain et douche	50
S2007H/WP	5,5 x 7	10	22	Bain et douche	25
S2007HL/WP	7 x 5,5	11	22	Bain et douche	25

### MODE D'EMPLOI

1. Insérez les extrémités du cathéter ou le dispositif de protection qui les contient dans le trou de la pochette.
2. Retirez le film recouvrant l'adhésif du trou.
3. Placez le bord inférieur du trou adhésif en adéquation avec le bord inférieur du site de sortie, ou du pansement s'il est présent, et complétez l'adhésion de bas en haut, en évitant la formation de plis ou de bulles d'air.
4. Attendez 10 minutes après avoir appliqué le dispositif.
5. Prenez une douche ou un bain, en veillant à ne pas frotter la zone proche de l'adhésif..
6. Maintenez la poche en place pendant 4 heures au maximum.
7. Pour le retrait, décollez délicatement une petite bande d'adhésif de la peau et tirez soigneusement par petits mouvements vers le haut, en veillant à ne pas tirer sur les extrémités du cathéter.



**CLASSIFICATION** • DISPOSITIF MEDICAL CE

**STÉRILISATION** • NON STÉRILE

  • USAGE UNIQUE