



EMODIAL®

EXIT-PRO® AG
SoftTouch

Pansement pour cathéter



EMODIAL®

Via Finati, 4-4/A - Ferrara - ITALY
Tel. +39 0532 978198 - Fax +39 0532 978414
www.emodial.com - info@emodial.com

Importer & CH-REP:



Heldswilerstrasse 13 | CH-9214 Kradolf
Tel. +41 (0)71 642 35 68 | info@fornimedical.ch
www.fornimedical.ch

REF. FR020-FM REV 10/2021



DESCRIPTION

EXIT-PRO[®] AG SoftTouch est un pansement absorbant non adhérent avec libération d'ions d'argent sur un support en tissu non tissé (TNT) avec la technologie adhésive "SoftTouch".

UTILISATION PRÉVUE

- A utiliser comme pansement pour les points d'insertion des dispositifs percutanés vasculaires et non vasculaires et comme barrière mécanique pour la compression et l'absorption des exsudats.
- Ne nécessite pas de pansements secondaires.
- Compatible avec tous les types de cathéters à usage standard.


OBJECTIF D'UTILISATION

Le pansement effectue une action de protection complète:

- **Le film libérant des ions d'argent:** garantit une efficacité antibactérienne immédiate et durable, jusqu'à 7 jours, contribuant à réduire le risque d'infection du site de sortie associé à l'utilisation de dispositifs percutanés.
- **Le support avec la technologie adhésive "SoftTouch":** protège la peau des dommages mécaniques causés par le retrait continu des pansements adhésifs (conséquence de traitements répétés), favorisant la réparation des tissus et agissant comme traitement et prévention des MARSIS.
- prévient l'apparition de rougeurs et d'irritations dues à l'application prolongée de pansements adhésifs
- solution optimale pour les patients ayant une tendance à avoir la peau sèche ou squameuse, typique des patients subissant, par exemple, des dialyses ou des traitements oncologiques.




La délicatesse de l'adhésif SoftTouch se combine à l'action antibactérienne et préventive de l'argent. Idéal pour les patients chroniques ou pour les patients à la peau délicate ou sensibilisée.

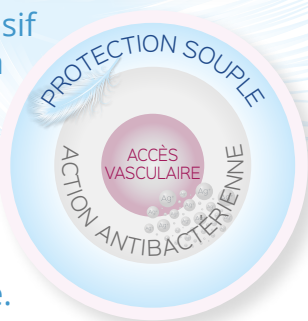

Adhésif traditionnel ou SoftTouch?

Les adhésifs traditionnels

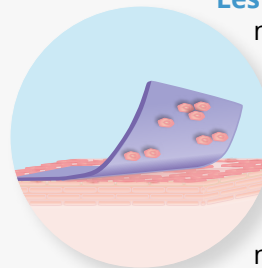


n'adhèrent pas uniformément à la peau, mais laissent des vides en surface qui sont ensuite comblés.

Une traction est exercée sur la peau, ce qui rend la fixation plus forte, adaptée aux traitements non répétés.

Dans les adhésifs SoftTouch,

l'adhésion à la peau est uniforme et présente une faible tension superficielle.

Le retrait est moins traumatisant, ce qui rend ce type d'adhésif idéal pour les traitements répétés ou pour les peaux délicates et sensibles.

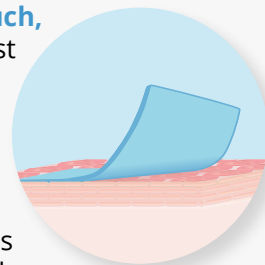

INSTRUCTION D'UTILISATION

1. Désinfectez le site de sortie et laissez-le sécher complètement.
2. Relevez les deux bords du papier de protection du pansement adhésif.
3. Placez le tampon d'**EXIT-PRO[®] AG SoftTouch** en contact avec la peau au niveau du site de sortie, en faisant sortir l'extrémité du dispositif percutané de la coupe préparée, et fixez-le en appuyant doucement sur l'adhésif qui l'entoure.
4. Remplacez **EXIT-PRO[®] AG SoftTouch** à chaque séance ou chaque fois qu'il est mouillé, sali ou qu'il est nécessaire d'inspecter le site de sortie.

RÉFÉRENCES

NO ART.	PANSEMENT (cm)	TAMPON (cm)	TROU ø (cm)	PCS/ SACHET	SACHETS/ CARTON
S0810/AG	10 x 8	5 x 4	0.4	1	25