



**EXIT-PRO<sup>®</sup> AG**

Katheterverband



**EMODIAL<sup>®</sup>**

Via Finati, 4-4/A - Ferrara - ITALY  
Tel. +39 0532 978198 - Fax +39 0532 978414  
[www.emodial.com](http://www.emodial.com) - [info@emodial.com](mailto:info@emodial.com)

Importer & CH-REP:



Heldswilerstrasse 13 | CH-9214 Kradolf  
Tel. +41 (0)71 642 35 68 | [info@fornimedical.ch](mailto:info@fornimedical.ch)  
[www.fornimedical.ch](http://www.fornimedical.ch)

REF. DE0011-FM REV 10/2021



## BESCHREIBUNG

**EXIT-PRO® AG** ist ein saugfähiger Verband mit einer Silberionen-freisetzenden, nicht haftenden Folie, die für den Ausgang des Katheters vorgeschritten ist und auf einem atmungsaktiven Klebträger in zwei Ausführungen angebracht wird:


- Non-Woven (NW/VLIES)
- transparentes Polyurethan (PU)

## VERWENDUNGSZWECK


- Zur Verwendung als Verband für die Einführungs-/ Austrittsstellen von vaskulären und nicht vaskulären perkutanen Geräten/Kathetern und als mechanische Barriere für die Kompression und Absorption von Exsudaten.
- Erfordert keine sekundären Verbände.
- Kompatibel mit allen handelsüblichen Kathetertypen.

## VERWENDUNGSNUTZEN

- Der Film auf Silberbasis garantiert eine sofortige und lang anhaltende antibakterielle Wirksamkeit von bis zu 7 Tagen und trägt so dazu bei, das Risiko einer Exit-Site-Infektion bei der Verwendung perkutaner Geräte/Katheter zu verringern.
- Verhindert Hautrötungen, die durch die mechanische und reibende Wirkung des Katheters verursacht werden.
- Für hyperthermische oder Hyperhidrose-Patienten wird das Modell mit NW-Träger empfohlen.

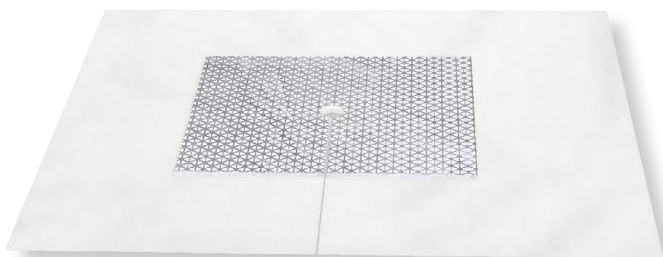

## Experimenteller Nachweis der antibakteriellen Aktivität

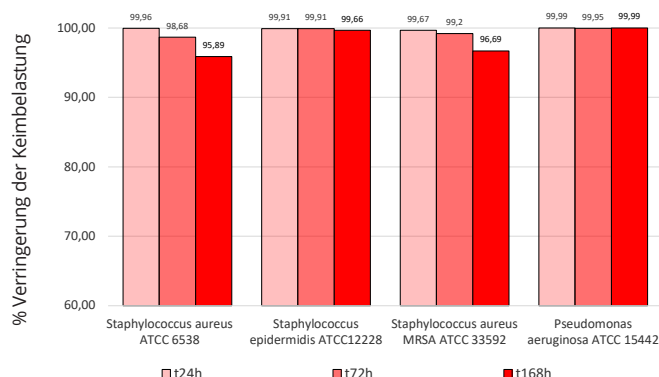

## GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Desinfizieren Sie die Austrittsstelle und lassen Sie sie vollständig trocknen.
2. Platzieren Sie das **EXIT-PRO® AG** in Kontakt mit der Haut an der Austrittsstelle, so dass das Ende der perkutanen Vorrichtung/ Katheter aus dem vorbereiteten Schnitt herausragt, und fixieren Sie es durch leichten Druck auf den umgebenden Klebstoff.
3. Schließen Sie die Anwendung ab, indem Sie das Schutzpapier auf der Rückseite des Pflasters entfernen (nur bei dem Modell mit PU-Klebstoff).
4. Tauschen Sie das **EXIT-PRO® AG** bei jeder Sitzung oder immer dann aus, wenn es nass oder schmutzig geworden ist oder wenn eine Inspektion der Austrittsstelle erforderlich ist.

## REFERENZEN

CODE	TRÄGER (cm)		PAD (cm)	MODELL (cm)	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNG/ BOX
	NW/VLIES	PU				
S0810Y/AG	10 x 7		5 x 4	Y SCHNITT	1	100
S0810YH/AG		10 x 8	5 x 4		1	100
S0810F/AG	10 x 7		5 x 4	SCHNITT UND LOCH ø 0.4	1	100
S0810FH/AG		10 x 8	5 x 4		1	100
S0805F/AG	10 x 7		5 x 4	SCHNITT UND LOCH ø 0.5	1	100
S0805FH/AG		10 x 8	5 x 4		1	100
S0808/AG	8 x 3		1.8 x 3.5	SCHNITT UND LOCH ø 0.4	2	100