



**EXIT-PRO<sup>®</sup> AG**

Pansement pour cathéter



**EMODIAL<sup>®</sup>**

Via Finati, 4-4/A - Ferrara - ITALY  
Tel. +39 0532 978198 - Fax +39 0532 978414  
[www.emodial.com](http://www.emodial.com) - [info@emodial.com](mailto:info@emodial.com)

Importer & CH-REP:



Heldswilerstrasse 13 | CH-9214 Kradolf  
Tel. +41 (0)71 642 35 68 | [info@fornimedical.ch](mailto:info@fornimedical.ch)  
[www.fornimedical.ch](http://www.fornimedical.ch)

REF. FR0011-FM REV 10/2021



# EXIT-PRO® AG

## DESCRIPTION

**EXIT-PRO® AG** est un pansement absorbant avec film non adhérent libérant des ions d'argent, prédécoupé pour la sortie du cathéter et appliqué sur un support adhésif respirant en deux versions:

- tissu non tissé (TNT)
- polyuréthane transparent (PU).

## UTILISATION PRÉVUE


- A utiliser comme pansement pour les points d'insertion des dispositifs percutanés vasculaires et non vasculaires et comme barrière mécanique pour la compression et l'absorption des exsudats.
- Ne nécessite pas de pansements secondaires.
- Compatible avec tous les types de cathéters à usage standard.

## OBJECTIF D'UTILISATION

- Le film à base d'argent garantit une efficacité antibactérienne immédiate et durable, jusqu'à 7 jours, contribuant ainsi à réduire le risque d'infection du site de sortie associé à l'utilisation de dispositifs percutanés.
- Préviens les rougeurs de la peau causées par l'action mécanique et le frottement du cathéter.
- Pour les patients hyperthermiques ou souffrant d'hyperhidrose, le modèle avec support non tissé (TNT) est recommandé.



## Preuve expérimentale de l'activité antibactérienne

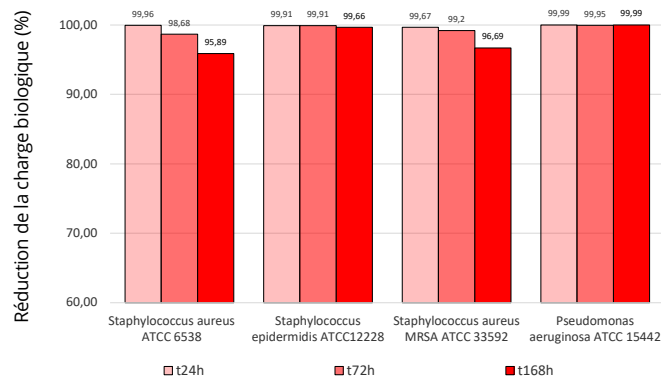

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Désinfectez le site de sortie et laissez-le sécher complètement.
2. Placez le tampon d'**EXIT-PRO® AG** en contact avec la peau au niveau du site de sortie, en faisant sortir l'extrémité du dispositif percutané de la coupe préparée, et fixez-le en appuyant doucement sur l'adhésif qui l'entoure.
3. Terminez l'application en retirant le papier de protection placé au dos du pansement adhésif (uniquement pour le modèle avec adhésif PU).
4. Remplacez **EXIT-PRO® AG** à chaque séance ou chaque fois qu'il est mouillé, sali ou qu'il est nécessaire d'inspecter le site de sortie.

## RÉFÉRENCES

NO ART.	SUPPORT(cm)		TAMPON (cm)	MODÈLE (cm)	PCS/ SACHET	SACHETS/ CARTON
	TNT	PU				
S0810Y/AG	10 x 7		5 x 4	AVEC DÉCOUPE EN Y	1	100
S0810YH/AG		10 x 8	5 x 4		1	100
S0810F/AG	10 x 7		5 x 4	AVEC DÉCOUPE ET TROU ø 0.4	1	100
S0810FH/AG		10 x 8	5 x 4		1	100
S0805F/AG	10 x 7		5 x 4	AVEC DÉCOUPE ET TROU ø 0.5	1	100
S0805FH/AG		10 x 8	5 x 4		1	100
S0808/AG	8 x 3		1.8 x 3.5	AVEC DÉCOUPE ET TROU ø 0.4	2	100