



EMODIAL®

Via Finati, 4-4/A - Ferrara - ITALY
Tel. +39 0532 978198 - Fax +39 0532 978414
www.emodial.com - info@emodial.com

Importer & CH-REP:



Heldswilerstrasse 13 | CH-9214 Kradolf
Tel. +41 (0)71 642 35 68 | info@fornimedical.ch
www.fornimedical.ch

Ref.FR007-FM - Rev. 03/2022



EMODIAL®

NOVA BETAFIX® AG

Bandage pour
accès vasculaire



DESCRIPTION

BETAFIX[®] AG est un bandage élastique avec un tampon absorbant et un film non adhérent libérant des ions d'argent, muni à une extrémité d'un sparadrap pour garantir l'étanchéité.

UTILISATION PRÉVUE

- Action hémostatique compressive des fistules artérioveineuses (FAV).
- Confinement des exsudats à la fin des traitements de dialyse, des thérapies intraveineuses, des transfusions sanguines.
- Protection de l'accès vasculaire dans la période suivant le traitement.

OBJECTIF D'UTILISATION


- Le film libérant des ions d'argent garantit une efficacité antibactérienne immédiate et durable, contribuant à réduire le risque d'infection du site de sortie.
- Réduit les signes d'inflammation associés aux ponctions veineuses répétées, comme celles de la fistule artérioveineuse (FAV).
- Préviend la formation d'escarres et rend moins traumatisante pour le patient la prochaine ponction veineuse AVF.
- Favorise la régénération de la peau.



REFERENCES

CODE	BANDAGE (cm)		TAMPON (cm)	PCS / SACHET	SACHETS / CARTON
	L	H			
S0029/AG	50 ± 10%	6	2.5 x 2.5	1	100
S0030/AG	50 ± 10%	6	2.5 x 2.5	2	50
S0015/AG	50 ± 10%	6	3.5 x 3.5	1	50
S0014/AG	50 ± 10%	6	3.5 x 3.5	2	50

Preuve expérimentale de l'activité antibactérienne

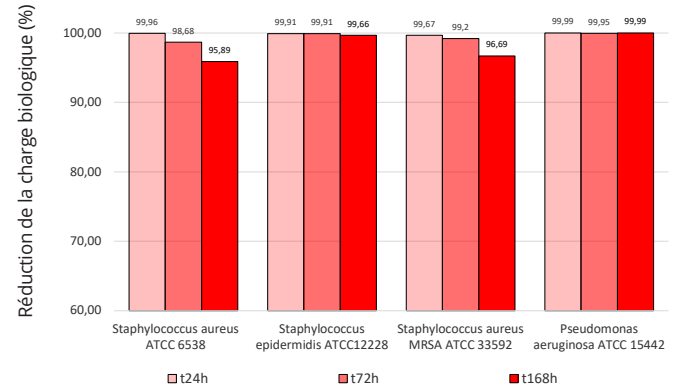

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Après avoir retiré l'aiguille et s'être assuré de la réduction du flux sanguin:

1. Dérouler la première partie du bandage avec le tampon.
2. Posez le tampon sur le bras à l'endroit où l'aiguille a été retirée.
3. Enrouler le bandage sur le bras en maintenant la tension nécessaire pour assurer l'hémostase et le maintenir en place.
4. S'assurer que la tension appliquée n'est pas excessive pour ne pas endommager la fistule.
5. Retirer le papier de protection du sparadrap à l'extrémité et l'appliquer sur le bandage pour le fixer au bras.

