



**EMODIAL®**

Via Finati, 4-4/A - Ferrara - ITALY  
Tel. +39 0532 978198 - Fax +39 0532 978414  
[www.emodial.com](http://www.emodial.com) - [info@emodial.com](mailto:info@emodial.com)

Importer & CH-REP:



Heldswilerstrasse 13 | CH-9214 Kradolf  
Tel. +41 (0)71 642 35 68 | [info@fornimedical.ch](mailto:info@fornimedical.ch)  
[www.fornimedical.ch](http://www.fornimedical.ch)



Ref. DE004-FM Rev. 07/2019



**EMODIAL®**

**SOVAN®**

**Fistelverband**



# SOVAN®

## BESCHREIBUNG

SOVAN ist ein hochabsorbierendes, zweilagiges hämostatisches Pad auf einem hypoallergenen, luftdurchlässigen Pflaster.

Auch für Patienten geeignet, die eine intravenöse Behandlung und Bluttransfusion benötigen.

## VERWENDUNGSZWECK

Komprimierende hämostatische Wirkung, speziell für die Pflege von arteriovenösen Zugängen. Zur Verwendung nach der Dialyse, nachdem die Fistelnadeln entfernt wurden.

## VERWENDUNGSNUTZEN

Entwickelt, um dank der Kompression der Punktionsstellen Blutungen zu stoppen und das Blutungsrisiko zu verringern. Wirkt gleichzeitig als Barriere gegen das Infektionsrisiko. Die nicht-anhaftende, biokompatible Schicht des Pads haftet nicht an der Haut, **sodass das Gerinnsel nicht entfernt werden muss und die Gefahr von Blutungen nicht besteht.** Das Pflaster sorgt dafür, dass das Pad in Position bleibt.



## Fistelverband

### GEBRAUCHSANWEISUNG

- 1** Ziehen Sie das Schutzpapier ab und befestigen Sie die erste Hälfte des Verbands auf der Haut.
- 2** Legen Sie das Pad auf die Einstichstelle, drücken Sie und entfernen Sie die Nadel.
- 3** Entfernen Sie die zweite Hälfte des Papiers und fixieren Sie die andere Hälfte des Verbandes fest auf der Haut. Bis zum Erreichen der Hämostase in Position halten.



### BESTELLDATEN

CODE	KLASSIFIZIERUNG	PAD	STK./ BEUTEL	BEUTEL/ SCHACHTEL
	cm	cm		
S0074	15 x 5	Ø 2,6	1	500
S0075			2	500
S0079	10 x 5		2	500

KLASSIFIZIERUNG • CE0373 MEDIZINPRODUKT  
STERILISIERUNG • GAMMA-STRAHLEN