

# miro

- ✓ leicht per Hand reißbar
- ✓ latexfrei
- ✓ wasserabweisend
- ✓ einzeln cellophaniert
- ✓ sehr gute Luftdurchlässigkeit
- ✓ wirtschaftlich aufgrund weniger Bindetouren
- ✓ keine zusätzliche Fixierung am Verbandende nötig

#### Material:

latexfreie Binde aus Polypropylen und Polyisopren

#### Eigenschaften:

längselastisch (Dehnung ca. 100%), kohäsiv, reissbar, luftdurchlässig und wasserabweisend

Ihr Ansprechpartner

## miro

miro Verbandstoffe GmbH  
In den Wiesen 3  
51674 Wiehl  
Tel. 02262-7248-0  
Fax: 02262-7248-48  
Email: [info@miro-verbandstoffe.de](mailto:info@miro-verbandstoffe.de)

Stand: 01/2023



## miro-fixorip

reißbare, kohäsive Fixierbinde



# Eine Binde, viele Möglichkeiten!

Diese kohäsive, elastische Fixierbinde kommt überall dort zum Einsatz, wo Verletzungen einen soliden Stütz- oder Entlastungsverband erfordern. Auch alle Arten von Kompressen (z. B. Kühlkompressen), Wundauflagen oder Salbenverbände können sicher und schnell mit nur wenigen Bindetouren fixiert werden.

Die Binde lässt sich faltenfrei anlegen, ist gut modellierbar und sorgt mit ihrer festen Struktur für eine kontrollierte Kompression ohne abzuschneiden oder zu verrutschen. Diese luftdurchlässige, wasserabweisende Binde haftet sehr gut auf sich selbst aber nicht auf Haut und Haaren.

Egal, ob in der Arztpraxis, Krankenhaus oder in der Erstversorgung - die miro-fixorip überzeugt durch ihre leichte Handhabung und lässt sich zudem problemlos reißen, so dass keine Schere benötigt wird.

## Anwendungsgebiete:

- für Stütz- und Entlastungsverbände
- zur schnellen Fixierung von Schienen, Salbenkompressen, Wundauflagen, Kühlkompressen
- geeignet für leichte bis mittlere Kompressionsverbände



### Verwendung als Fingerkuppenverband

Ein Verband an den Fingerkuppen lässt sich meist schwer sicher und dauerhaft fixieren.

Die Breite 2,5cm eignet sich hervorragend als Fingerkuppenverband. Egal ob eine Wundauflage oder eine Salbenkompressen fixiert werden müssen - wenige Wickeltouren reichen, um den Verband zuverlässig dort zu halten wo er platziert werden soll.



\* Bitte beachten Sie Ihre jeweils gültige KV-Vereinbarung aus Ihrer Region

## Bestellinformation

Breite	Länge	Farbe	Art. Nr	PZN	VE
5,0cm	4,5m	rot	52005	16796018	10 St.
7,5cm	4,5m	rot	52008	16796024	10 St.
10,0cm	4,5m	rot	52010	16796030	10 St.
5,0cm	4,5m	schwarz	52105	16796099	10 St.
7,5cm	4,5m	schwarz	52108	16796107	10 St.
10,0cm	4,5m	schwarz	52110	16796159	10 St.
2,5cm	4,5m	blau	52702	16796047	10 St.
5,0cm	4,5m	blau	52705	16796053	10 St.
7,5cm	4,5m	blau	52708	16796076	10 St.
10,0cm	4,5m	blau	52710	16796082	10 St.