

PAVIS S.p.A.

Sede Legale:

Via G. Rossini, 11/B - 21020 Buguggiate (VA)

Tel. (+39) 0332 45 54 63

Fax (+39) 0332 45 97 48

www.pavis.it - info@pavis.it

pavispec@certimprese.it

R.I. / C.F. / P.IVA 01286640121



① **PAVIS S.p.A.** - Dichiaro che il prodotto:

CAVIGLIERA BIVALVA

è conforme al Regolamento (UE) 2017/745 riguardante i **DISPOSITIVI MEDICI** di classe 1

② **PAVIS S.p.A.** - Hereby declares that the:

ANKLE BRACE WITH TWO RIGID SHELLS

comply with the EU Medical Device Regulation 2017/745 (class 1 MD)



1 - INDICAZIONI D'USO

- Distorsioni medie e acute del comparto tibio tarsico
- Indicata nella terapia riabilitativa per la ripresa dell'attività sportiva

2 - CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI

Trattandosi di un prodotto **NON INVASIVO**, composto prevalentemente da materiali non allergici, non sono mai stati riscontrati effetti collaterali rilevanti.

Si possono verificare arrossamenti cutanei causati da sfregamento nel caso non venga opportunamente regolata, pertanto si consiglia l'utilizzo sopra una calza.

3 - MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

- Prima di procedere al lavaggio, sganciare e sfilare i lacci e cuscinetti interni dalle placche e agganciare le parti in velcro



Questo dispositivo non è biodegradabile e anche se costituito di materiale di origine naturale, **AL TERMINE DELLA SUA VITA UTILE NON PUÒ ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.**
SMALTIRE INSIEME AI NORMALI RIFIUTI SOLIDI URBANI.



1 - INDICATIONS

- Acute and medium sprains of the tibio/tarsic joint - Luxations
- Rehabilitation period for the resumption of sport activities

2 - CONTRA-INDICATIONS AND SIDE-EFFECTS

Since this device is NON-INVASIVE and made with non-allergenic fabrics, no negative or side effects have ever been noted.

In case the brace is not correctly fixed, skin redness may arise due to frictions. It is therefore recommended to wear it over a sock.

3 - MAINTENANCE AND CARE


- Before washing, unhook and take off shells and close velcro



This device is non-biodegradable. Even though it is made of natural fabrics, AT THE END OF ITS USABLE LIFE, YOU SHOULD DISCARD IT ALONG WITH YOUR NORMAL WASTE.

COME SI INDOSSA / INSTRUCTIONS

①

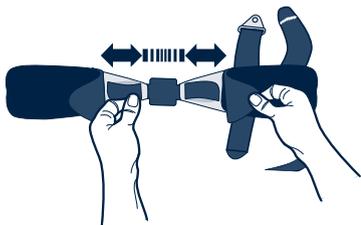

②



③



④



#019