

**PAVIS S.p.A.**

Sede Legale:

Via G. Rossini, 11/B - 21020 Bugugiate (VA)

Tel. (+39) 0332 45 54 63

Fax (+39) 0332 45 97 48

[www.pavis.it](http://www.pavis.it) - [info@pavis.it](mailto:info@pavis.it)[pavispec@certimprese.it](mailto:pavispec@certimprese.it)

R.I. / C.F. / P.IVA 01286640121

*Organizzazione con sistema di gestione certificato secondo la norma ISO 9001, ISO 13485  
Management system standards certified according to ISO 9001, ISO 13485*

① **PAVIS S.p.A.** - Dichiaro che il prodotto:

**IMMOBILIZZATORE DI GOMITO**

basic UDI-DI 80287180000020MD

è conforme al Regolamento (UE) 2017/745 riguardante i DISPOSITIVI MEDICI di classe 1

② **PAVIS S.p.A.** - Hereby declares that the:

**ELBOW IMMOBILIZER**

basic UDI-DI 80287180000020MD

comply with the EU Medical Device Regulation 2017/745 (class 1 MD)

**1 - INDICAZIONI D'USO**

- Immobilizzazione postoperatoria dopo un'osteosintesi o un intervento sulle parti molli al gomito
- Immobilizzazione dopo una lussazione
- Immobilizzazione dopo una contusione, una distorsione o ferite infette

**2 - CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI**

Nel caso di dolori di pressione, verificare che sia stata scelta la taglia corretta.

Trattandosi di un prodotto NON INVASIVO, composto prevalentemente da materiali non allergici, non sono mai stati riscontrati effetti collaterali di alcun genere.

**3 - MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE**

Questo dispositivo non è biodegradabile e anche se costituito di materiale di origine naturale,  
AL TERMINE DELLA SUA VITA UTILE NON PUÒ ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.  
SMALTIRE INSIEME AI NORMALI RIFIUTI SOLIDI URBANI.



### 1 - INDICATIONS

- Post-operative immobilisation after osteosynthesis or soft tissue surgery in area of elbow
- Immobilising after luxations
- Immobilising following contusions, distortions or if wounds are infected

### 2 - CONTRA-INDICATIONS AND SIDE-EFFECTS

In the event of pressure complaints, please check whether the proper size has been selected.


Since this device is NON-INVASIVE and made with non-allergenic fabrics, no negative or side effects have ever been noted

### 3 - MAINTENANCE AND CARE



This device is non-biodegradable. Even though it is made of natural fabrics, after use, avoid release the product to the environment. AT THE END OF ITS USABLE LIFE HAS TO BE DISCHARGED ALONG WITH SOLID ORDINARY WASTE.

### COME SI INDOSSA / INSTRUCTIONS

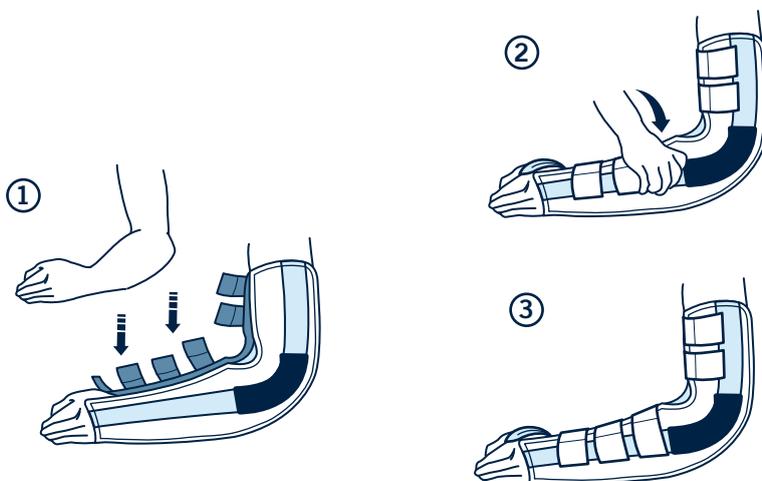

#138

