



EXIT-PAD[®] **AG**

KATHETERVERBAND



EMODIAL[®]

Via Finati, 4-4/A - Ferrara - ITALY
Tel. +39 0532 978198 - Fax +39 0532 978414
www.emodial.com - info@emodial.com

Importer & CH-REP:



Heldswilerstrasse 13 | CH-9214 Kradolf
Tel. +41 (0)71 642 35 68 | info@fornimedical.ch
www.fornimedical.ch

REF. DE0012-FM REV 10/2021



BESCHREIBUNG



EXIT-PAD® AG ist ein absorbierender Verband mit einem Silberionen-freisetzenden, nicht haftenden Film, der für den Ausgang des Katheters vorgeschnitten ist.

VERWENDUNGSZWECK


- Zur Verwendung als Verband für die Einführungs-/Austrittsstellen von vaskulären und nicht vaskulären perkutanen Geräten/Kathetern und als mechanische Barriere für die Kompression und Absorption von Exsudaten.
- Kompatibel mit allen handelsüblichen Kathetertypen.

VERWENDUNGSNUTZEN

- Der Film auf Silberbasis bewirkt eine sofortige und lang anhaltende antibakterielle Wirkung von bis zu 7 Tagen und trägt so dazu bei, das Risiko von Infektionen an der Einführungs-/Austrittsstelle bei der Verwendung von perkutanen Geräten/Kathetern zu verringern.
- Verhindert Hautrötungen, die durch die mechanische und reibende Wirkung des Katheters verursacht werden.

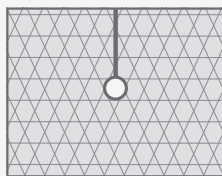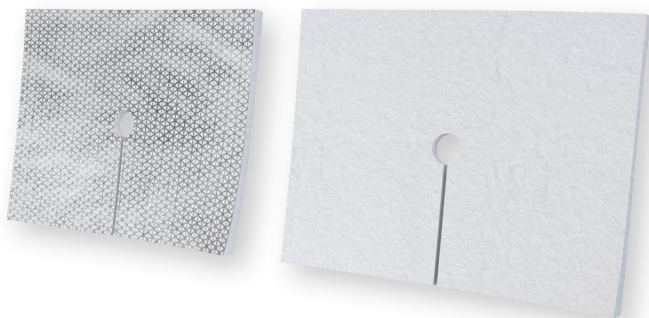


SCHNITT UND LOCH

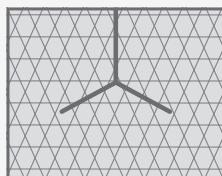

Y-SCHNITT

Experimenteller Nachweis der antibakteriellen Aktivität

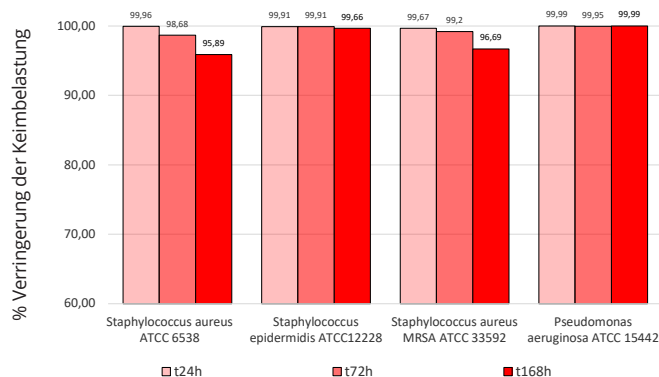

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Desinfizieren Sie die Austrittsstelle und lassen Sie sie vollständig trocknen.
2. Die silberne Seite des **EXIT-PAD® AG** mit der Haut an der Einführungs-/Austrittsstelle in Kontakt bringen, so dass das Ende des perkutanen Geräts/Katheters aus dem vorbereiteten Schnitt herausragt, und mit einem Pflaster oder einem atmungsaktiven, sterilen Verband sichern.
3. Tauschen Sie das **EXIT-PAD® AG** bei jeder Sitzung oder immer dann aus, wenn es nass oder schmutzig wird oder eine Inspektion der Austrittsstelle erforderlich ist.

REFERENZEN

CODE	PAD (cm)	MODELL (cm)	STÜCK/PACKUNG	PACKUNG/BOX
S0903/AG	3.5 x 4.5	Mit Schnitt und Loch ø 0.4	1	100
S0904/AG	3.5 x 4.5	Mit Schnitt und Loch ø 0.5	1	100
S0905/AG	5 x 4	Mit y-Schnitt	1	100
S0925/AG	3.5 x 2.2	Mit Schnitt und Loch ø 0.4	2	100