



**EXIT-PAD®** AG

Pansement pour cathéter



**EMODIAL®**

Via Finati, 4-4/A - Ferrara - ITALY  
Tel. +39 0532 978198 - Fax +39 0532 978414  
[www.emodial.com](http://www.emodial.com) - [info@emodial.com](mailto:info@emodial.com)

Importer & CH-REP:



Heldswilerstrasse 13 | CH-9214 Kradolf  
Tel. +41 (0)71 642 35 68 | [info@fornimedical.ch](mailto:info@fornimedical.ch)  
[www.fornimedical.ch](http://www.fornimedical.ch)

REF. FR0012-FM REV 10/2021



# EXIT-PAD® AG

## DESCRIPTION



**EXIT-PAD® AG** est un pansement absorbant avec un film non adhérent libérant des ions d'argent, prédécoupé pour la sortie du cathéter.

## UTILISATION PRÉVUE


- À utiliser comme pansement pour les points d'insertion des dispositifs percutanés vasculaires et non vasculaires et comme barrière mécanique pour la compression et l'absorption des exsudats.
- Compatible avec tous les types de cathéters à usage standard.

## OBJECTIF D'UTILISATION

- Le film à base d'argent garantit une efficacité antibactérienne immédiate et durable, jusqu'à 7 jours, contribuant ainsi à réduire le risque d'infection du site de sortie associé à l'utilisation de dispositifs percutanés.
- Préviens les rougeurs de la peau causées par l'action mécanique et le frottement du cathéter.

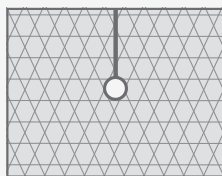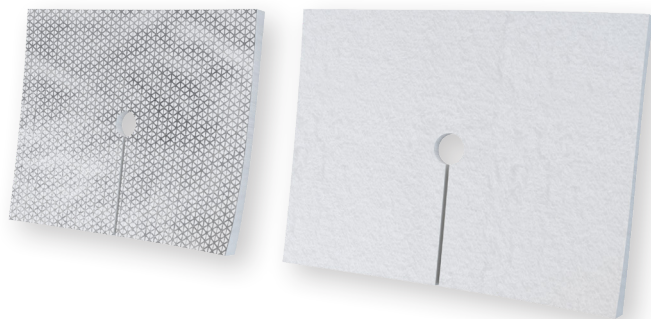


DÉCOUPE ET TROU

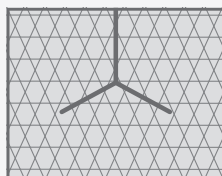

DÉCOUPE EN Y

## Preuve expérimentale de l'activité antibactérienne

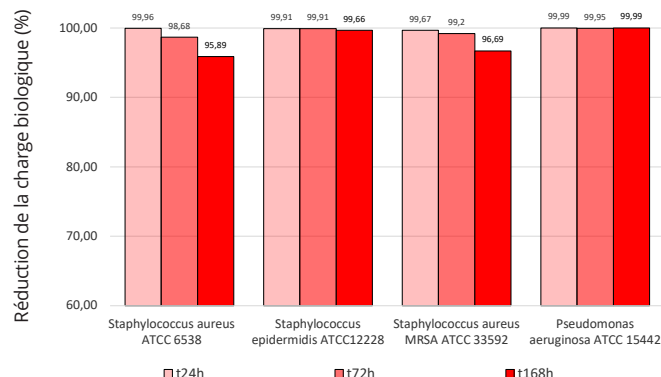

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Désinfectez le site de sortie et laissez-le sécher complètement.
2. Placez le côté argenté d'**EXIT-PAD® AG** en contact avec la peau au niveau du site de sortie, en faisant sortir l'extrémité du dispositif percutané de la coupe préparée, et fixez-la avec du sparadrap ou un pansement stérile transpirant.
3. Remplacez **EXIT-PAD® AG** à chaque session ou chaque fois qu'il est mouillé, sale ou qu'il est nécessaire d'inspecter le site de sortie.

## RÉFÉRENCES

NO ART.	TAMPON (cm)	MODÈLE (cm)	PCS/SACHET	SACHETS/CARTON
S0903/AG	3.5 x 4.5	Avec découpe et trou ø 0.4	1	100
S0904/AG	3.5 x 4.5	Avec découpe et trou ø 0.5	1	100
S0905/AG	5 x 4	Avec découpe en y	1	100
S0925/AG	3.5 x 2.2	Avec découpe et trou ø 0.4	2	100